

## **Introductie:**

Al eeuwenlang wordt steenzout gebruikt om luchtwegproblemen als astma, COPD, bronchitis, sinusitis, allergieën en andere ademhalingsproblemen te verlichten. Zout mijn- en zoutkamer-therapie zijn erg populair in Europa. De Dry Salt Inhaler® brengt dit natuurlijke microklimaat naar u toe. De Dry Salt Inhalator® gebruikt geselecteerde therapeutische mineralen, in 100% natuurlijke vorm, welke worden gewonnen uit de wereldberoemde Transilvaanse Praid zoutmijn in Roemenië. Dit wonderbaarlijke zout is verpakt in een houder van kunststof van medisch kwaliteit met een uniek eenweg veiligheidsventiel dat voorkomt dat het zout vervuild wordt en ervoor zorgt dat de gebruiker correct ademhaalt om het maximale therapeutische effect te bewerkstelligen.

## **Farmacologische eigenschappen van het zout:**

Mucolitisch, mucokinetisch en hoestbevorderend, anti-bacterieel, antimycotisch, antiallergisch en antiphlogistisch (ontstekingsremmend).

## **Chemische componenten:**

Natrium Chloride, Magnesium, Calcium en andere mineralen in natuurlijke vorm.

## **Onderhoud:**

U dient periodiek te controleren op zichtbare verstoppingen in het luchtkanaal aan de onderzijde. Om deze te verwijderen kunt u met behulp van een naald de vastzittende zoutdeeltjes losdrukken zodat er wederom lucht door de opening kan stromen.

- Maak de buitenkant van de Dry Salt Inhalator® alleen schoon met een klamme schone doek.
- Alleen de neusadapter kan worden gewassen. Droog de adapter goed af voor gebruik.

## **Waarschuwingen:**

- Laat geen speeksel of andere vloeistof door de Dry Salt Inhaler® lopen;
- Bewaar de Dry Salt Inhaler® op kamertemperatuur op een schone en droge plaats. Bewaar hem niet in de badkamer of douche!;
- Dit product kan naast elke voorgeschreven medische therapie worden gebruikt;
- Laat de Dry Salt Inhaler® niet vallen. Dit kan de zoutkristallen doen breken. Het is belangrijk dat de zoutkristallen intact en in de Dry Salt Inhaler® blijven om irritatie van de neusholten te voorkomen;
- Gezamenlijk gebruik wordt niet aanbevolen.

## **Speciale waarschuwing:**

Gebruik de Dry Salt Inhaler® NIET tijdens een Exacerbatie COPD.

Exacerbatie COPD is een plotselinge verergering van klachten. Raadpleeg in voorkomend geval altijd uw (huis)arts.

## **Bijwerkingen:**

Geen

## **Hoe gebruikt u de Dry Salt Inhaler®?**

1. Verwijder de dop van het mondstuk.

*Orale Inhalatie (onderste luchtwegen)*

2. Inhaleer door de Dry Salt Inhaler® zoals normaal.

3. Na inhalatie verwijdert u de Dry Salt Inhaler® van de mond en ademt via de neus uit.

4. Deze nasale uitademing is een voorwaarde om het therapeutisch effect van het zout te bereiken.

*Nasale Inhalatie (bovenste luchtwegen)*

2. Plaats de nasale adapter op de Dry Salt Inhaler®

3. Plaats het neusstuk voorzichtig in een neusgat en blokkeer het andere neusgat met de vinger. Inhaleer zoals normaal via de neus in.

4. Na inhalatie verwijdert u de Dry Salt Inhaler® en ademt u via de mond of via het andere neusgat uit.

**Duur van de behandeling:**

Gebruik de Dry Salt Inhaler® dagelijks gedurende 21 dagen. Herhaal indien nodig

**Disclaimer:**

Bovenstaande informatie is niet beoordeeld door FDA. Dit product is niet bedoeld om huidige therapie te vervangen noch voor diagnosestelling, behandeling, genezing of preventie van enige ziekte.

**In geval van acute ziekte raden wij aan uw arts te raadplegen voor gebruik.**

De Dry Salt Inhaler® is verkrijgbaar zonder recept.